

Kurzgebrauchsanweisung der SLK Lifterwaage

Einschalten

Drücken Sie eine Sekunde lang  um das Gerät hochzufahren, den Batterietest und die Initialisierung durchzuführen.




Der Bildschirm zeigt die Symbole für die Erkennung an, während die Waage die Ladung ermittelt und die Null-Einstellung vornimmt.



Ausschalten

Drücken Sie  eine Sekunde lang um die Waage abzuschalten.

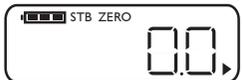

Das Display zeigt das Symbol für die Abschaltung an.



Tarieren

Drücken Sie  um das Gewicht als Tara zu speichern.



Die Funktionen der SLK Lifterwaage finden Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung.



Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999
E-Mail: info@slk-gmbh.de
Internet: www.slk-gmbh.de

Revision: 002 - 01/2025

Artikel-ID 8584

 @SLK Medizintechnik

 slk_medizintechnik

#workgreen



Wellell Group

Montageanleitung und Kurzgebrauchsanweisung SLK Lifterwaage



Diese Montageanleitung erklärt Ihnen, wie Sie die SLK Lifterwaage an Ihren SLK Patientenlifter anbringen.

1



8]YgY'K UU[Y XUFZ'bi f'Znf'X]Y'8Ui Yf'XYgK]Y[Ybg' Y]b[YVUi hk YfXYb i bX]gh'Znf'X]Y'bcfa UYb' <YVYj cf[Üb[Y'k]YXYf'Ui gni VUi Yb" DUW_Yb'G]Y X]Y G@' @Zhf'k UU[Y'Ui g" ÑVYfd'fñZYb'G]Y XYb'DUW_i b[g]b\U'hi bX' gYhmYb'G]Y X]Y'6UhfYf]Yb'Y]b"

DUW_i b[g]b\U'h

- ▽ K UU[Y'a]h'a cbh]YfhYa '5XUdhYf
- ▽ 6UhfYf]Yb
- ▽ 6c`nYb'i bX'G@G]WYfi b[
- ▽ G\Ü_Y' f5XUdhYfL

2



8Ya cbh]YfYb'G]Y XYb'@ZhfYfñ[Y' ÆfYg' G@' DUh]YbhYb']ZhfYf"

4



GhYW_Yb'G]Y X]Y'K UU[Y'a]h'XYa '5XUdhYf'Ui Z'XYb' 6c`nYb"

A cbh]YfYb'G]Y X]Y'VY]XYb'HY]Y'a]h'XYa '6c`nYb' i bX'XYf'G@G]WYfi b["

4



6Y]gd]Y'. A cbh]YfhUb'Y]bYa ' :`mYf'D'i g@ZhfYf"

5



A cbh]YfYb'G]Y'Ymh'X]Y'9]b\Y]h'Ui g'fUbgdc'fhVñ[Y' i bX'K UU[Y'Ua '<YVYUfa "

*



Beispiel: Montiert an einem Blue Flyer Compact mit Schäkel als Adapter.

(für die Blue Serie ist der mitgelieferte Schäkel notwendig.)