



**Wellell** Group

# Gebrauchsanweisung SLK 8-Punkt Lifterbügel



Basis UDI-DI 426064753PL03000014N

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 185**

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 275**

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 300**

Original Gebrauchsanweisung



# Inhaltsverzeichnis

Begrüßung	3
Allgemeine Informationen	3
8-Punkt Lifterbügel Modelle	4
Zweckbestimmung und Wiedereinsatz	4
Indikation	5
Kontraindikation	5
Anwendung im Nassbereich	5
Verwendete Materialien	5
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>6</b>
Überblick	8
Erläuterung der Typenschilder	8
Liftergurte	9
Lieferumfang	9
Zusammenbau	9
Bolzen mit SL-Sicherung	10
Montage am Liftersystem Universallifter	11
Montage am Liftersystem Deckenlifter	12
<b>Checkliste vor jedem Einsatz</b>	<b>13</b>
<b>Patiententransport</b>	
<b>Aufnahme</b>	<b>14</b>
<b>Einstellung Schlitten</b>	<b>15</b>
<b>Transfer</b>	<b>15</b>
Technische Daten / Maße	16
Reinigung	16
Wartung	17
Wartungsplan	18
Konformität	18
Angewendete Normen	19
Gewährleistung / Garantie	19
Lebensdauer	19
Entsorgung	19
Artikel-IDs der Ersatzteile	19
Kontaktdaten	20

## Begrüßung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause **SLK** entschieden haben. Es wurde von Fachleuten mit Sorgfalt entwickelt, getestet und im Einklang mit den geltenden Richtlinien und Normen hergestellt.

Die Firma **SLK** nutzt **über 80 Prozent selbst produzierten Grünstrom aus reiner Sonnenenergie** für Produktion, Chemothermische Aufbereitung, Service und den restlichen Energiebedarf. Sämtliche Arbeitsabläufe sind auf **maximale Effizienz zur Nutzung von Solarenergie** optimiert. Damit leistet das Unternehmen schon jetzt einen **signifikanten Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz**.

## Allgemeine Informationen

**Lesen Sie vor Benutzung des Produkts die gesamte Gebrauchsanweisung. So vermeiden Sie Fehler durch Informationsmangel.**

Kapitel mit **hellgrau** hinterlegten Überschriften sind hauptsächlich an den **Betreiber** (z. B. das Sanitätshaus) adressiert. Die **dunkelgrau** hinterlegten Überschriften richten sich an den **Anwender** (z. B. die Pflegekraft). **Mittelgrau** steht für **beide Adressaten**.

**Farbige Inhalte sind besonders sicherheitsrelevant.**

Die Modelle der **SLK 8-Punkt Lifterbügel** können für Kinder, Erwachsene, leichte oder schwere Patienten eingesetzt werden. Diese Lifterbügel eignen sich für den Einsatz im **Homecare-Bereich**, in **Pflegeinstitutionen** oder **Kliniken**. Mit dem entsprechenden **SLK 8-Punkt Liegendgurt** kombiniert, sind sie **zum schonenden liegenden Positionswechsel** durch eine Pflegekraft geeignet. Die Lifterbügel sind auch **im Nassbereich einsetzbar**.

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir besonderen Wert auf **Anwenderfreundlichkeit**. Das gilt natürlich auch für diese Gebrauchsanweisung, die einer kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung unterliegt. Deshalb sollten Sie stets die **aktuelle Version** für Ihr Produkt benutzen, die Sie auf unserer Internetseite **slk-gmbh.de** finden.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für den **SLK 8-Punkt Lifterbügel**, der in **vier verschiedenen Ausführungen** erhältlich ist:

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 185** (Maximallast 185 kg)

für **SLK Carry 185** und **SLK Multy Universallifter** Artikel-ID **8062**

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 275** (Maximallast 275 kg)

für **SLK Luna – stationäre Deckenlifternkassette** Artikel-ID **8063**

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 300** (Maximallast 300 kg)

für **SLK Carry 250 XL** Artikel-ID **8065**

## Zweckbestimmung und Wiedereinsatz

Die **SLK 8-Punkt Lifterbügel** sind Medizinprodukte der Klasse 1 nach der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

**Zweckbestimmung ist der schonende liegende Patiententransport.**

Dazu muss der **SLK 8-Punkt Lifterbügel** mit einem **SLK Patientenlifter** oder einem **SLK Luna Deckenliftersystem** verbunden werden. Für die Anwendung ist außerdem ein **SLK 8-Punkt Liegendgurt** erforderlich.

Alle **SLK 8-Punkt Lifterbügel** sind **wiederverwendbare Medizinprodukte**. Sie können nach erfolgter Reinigung und Wartung erneut bei einem anderen Patienten eingesetzt werden.

## Indikation

Die **SLK 8-Punkt Lifterbügel** sind für die **Pflege zu Hause**, in **Pflegeeinrichtungen** und **Krankenhäusern** geeignet.

## Kontraindikation

Die Anwendung von Patientenliftern lässt Kräfte auf den Körper des Patienten einwirken, die nicht bei jedem Krankheitsbild vertragen werden. Nehmen Sie **vor jeder Anwendung** des **SLK 8-Punkt Lifterbügel** eine **kritische Betrachtung des Patienten und seines Zustandes** vor. Fragen Sie im Zweifel den behandelnden Arzt.

## Anwendung im Nassbereich

Die **SLK 8-Punkt Lifterbügel** sind **für den Nassbereich**, wie z. B. Toilette und Bad **geeignet**. Für den Einsatz unter der Dusche sind die Lifterbügel nicht geeignet.

## Verwendete Materialien

Die Konstruktion besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil, die Ausleger bestehen aus Stahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung zum Korrosionsschutz.

Die Stopfen sind aus dem Kunststoff PE hergestellt.


Bolzen und Schrauben bestehen aus handelsüblichen Stählen und sind mit Chrom VI-freien Zinküberzügen gegen Korrosion geschützt.

## Sicherheitshinweise

- **Der SLK 8-Punkt Lifterbügel darf ausschließlich mit dem dazu passenden SLK 8-Punkt Liegendgurt verwendet werden.** Bei Benutzung anderer Gurte kann es zu Beschädigungen kommen und Unfälle können nicht ausgeschlossen werden.
- **Es müssen immer alle acht Schlaufen des SLK 8-Punkt Liegendgurt eingehängt sein.** Bei Nichtbeachten kann der Lifterbügel beschädigt werden und es kann zu Unfällen kommen.
- **Überschreiten Sie nicht die zulässige Maximallast,** diese **Angabe** finden Sie **auf den Typenschildern** des Lifterbügels. Bei Missachtung kann der Lifterbügel beschädigt und der Patient gefährdet werden.
- Liftersysteme und **der SLK 8-Punkt Lifterbügel** können unterschiedliche Tragfähigkeiten haben, **es ist immer die niedrigste Tragfähigkeit verbindlich.**
- Überprüfen Sie vor jeder Anwendung des **SLK 8-Punkt Lifterbügel** seine Einsatzbereitschaft anhand der „**Checkliste vor jedem Einsatz**“. **(Seite 13)** **Bei Auffälligkeiten benutzen Sie den Lifterbügel nicht und wenden Sie sich umgehend an den Fachhandel.**
- **Der SLK 8-Punkt Lifterbügel darf nicht baulich verändert werden.** Bauliche Veränderungen können den Lifterbügel beschädigen und zu Unfällen führen.
- Verwenden Sie den **SLK 8-Punkt Lifterbügel** nur wenn **ausreichend Platz** vorhanden ist. Das gilt besonders beim Passieren von Türen.
- Am **SLK 8-Punkt Lifterbügel** muss **jährlich eine Wartung** inklusive Test mit Maximallast, durch geschultes Fachpersonal durchgeführt und dokumentiert werden. Ein nicht-gewarteter Lifterbügel birgt ein latentes Sicherheitsrisiko.
- Das **Verpackungsmaterial** unseres Produkts muss von Kindern ferngehalten und fachgerecht entsorgt werden. Falsch angewendet kann es die Gesundheit von Kindern gefährden und zum Erstickungstod führen.

## Sicherheitshinweise

- **Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Lifter-systems und des Liftergurtes.**
- Sollte **innerhalb der EU** ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt auftreten, ist dieser dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

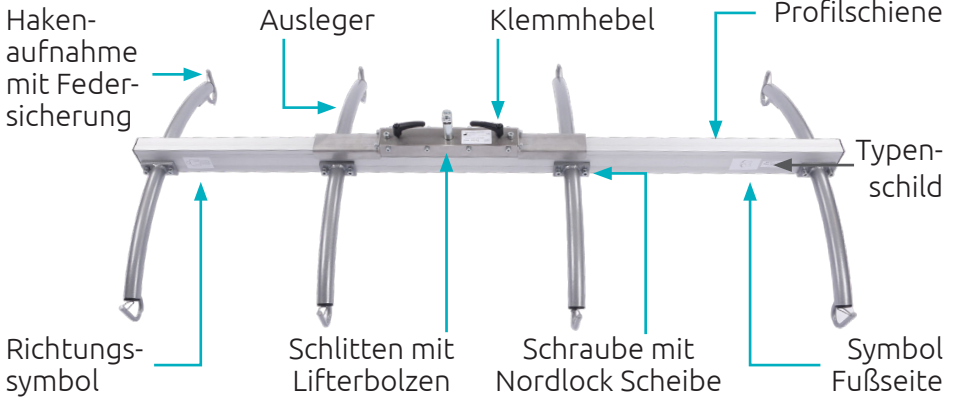

## Erläuterung der Typenschilder und Symbole



Hersteller ist **SLK Vertriebsgesellschaft mbH.**

**06/2020**

**Herstellungsdatum**



Medizinprodukt für das eine Europäische Konformitätserklärung ausgestellt wurde.

**Artikel-ID**

**8062** für **SLK Carry 185** und **SLK Multy Universallifter**

**8063** für **SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette**

**8065** für **SLK Carry 250 XL**

**max. xxx kg**

**Maximallast**



**Gebrauchsanweisung beachten.**



**Symbol Anwendungsrichtung Kopfseite**



**Symbol Anwendungsrichtung Fußseite**



# Liftergurte

Einzigiger zur Verwendung am **SLK 8-Punkt Lifterbügel** freigegebener **Liftergurt** ist der **SLK 8-Punkt Liegendtransportgurt (Artikel-ID 5699)**. Den Gurt gibt es in einer Universalgröße.

## Lieferumfang

- **Profilschiene mit Schlitten**
- **8 Ausleger mit Hakenaufnahme**
- **Gebrauchsanweisung**

Die Ausführung des Lifterbügels kann, je nach Modell, von dieser Abbildung etwas abweichen.





## Zusammenbau





Der **SLK 8-Punkt Lifterbügel** wird **teilzerlegt** geliefert. Zum Zusammenbau benötigen Sie einen **6 mm Inbus-Schlüssel** mit Drehmoment.

- Legen Sie die Profilschiene zur Montage auf eine **ausreichend große Arbeitsfläche**.
- Entfernen Sie zuerst **ein Schraubenpaar (Abb. 1)** mit den dazugehörigen **Nordlockscheiben (Abb. 2)**. Mit welchem Ausleger Sie beginnen ist nicht wichtig.

- **Bewegen Sie die Profilschiene so wenig wie möglich**, wenn nicht alle Schrauben in den dazugehörigen **Nutensteinen** eingeschraubt sind. **(Abb. 3)**
- Nehmen Sie einen der acht identischen **Ausleger** und schrauben Sie ihn mit der **Federsicherung nach oben (Abb. 4)** an den **Nutensteinen** fest. Verwenden Sie unbedingt die zugehörigen **Nordlockscheiben**. **(Abb. 2)**
- Ziehen Sie die Schrauben mit **15 - 18 Nm** an. Nehmen Sie evtl. einen Drehmomentschlüssel zur Hilfe. **(Abb. 5)**
- **Wiederholen Sie diesen Vorgang** mit den anderen drei Auslegern dieser Seite. Montieren Sie danach die vier Ausleger der anderen Seite.

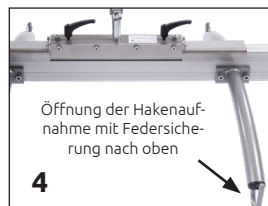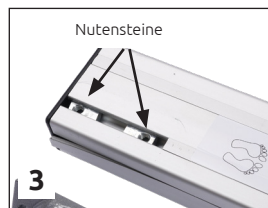

## Bolzen mit SL-Sicherung

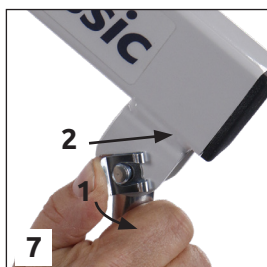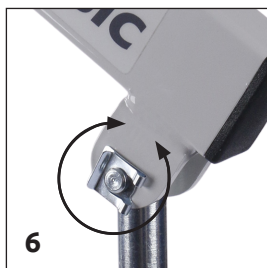

An den **SLK 8-Punkt Lifterbügel 185 und 300** befindet sich am **Lifterbolzen** ein **10 mm Bolzen mit SL-Sicherung**. Dadurch ist eine **werkzeugfreie Montage und Demontage** am Liftersystem möglich.

- Ansicht im montierten Zustand. Die **SL-Sicherung** ist **leicht drehbar**. **(Abb. 6)**
- Zur **Demontage** biegen Sie die **vordere Lasche nach außen** über die Kontur des Bolzens. **(Abb. 7 - 1)**
- **Schieben** Sie die SL-Sicherung mit gebogener Lasche **aus der Nut**. **(Abb. 7 - 2)**
- Der **Bolzen** lässt sich nun **entfernen**.

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 185** (Maximallast 185 kg)

für **SLK Carry 185** und **SLK Multy Universallifter** Artikel-ID 8062

**SLK 8-Punkt Lifterbügel 300** (Maximallast 300 kg)

für **SLK Carry 250 XL**

Artikel-ID 8065



Der **SLK 8-Punkt Lifterbügel 185** für **SLK Carry 185** und **SLK Multy Universallifter** und der **SLK 8-Punkt Lifterbügel 300** für **SLK Carry 250 XL** sind beide mit einem **Lifterbolzen mit SL-Sicherung** ausgestattet. Dadurch lässt sich der Lifterbügel **werkzeugfrei** am Hebearm des Universallifters montieren. (*Abb. 8 bis 10*)

**Info zu Bolzen mit SL-Sicherung: Seite 10.**



- Legen Sie den **SLK 8-Punkt Lifterbügel auf einen Tisch** oder ein freies Bett, um ihn am Universallifter zu montieren.

- **Entfernen** Sie ggf. den **vorhandenen Lifterbügel** vom Lifter. Der Lifterbolzen gehört zum jeweiligen Bügel.

- **Entfernen** Sie beim **SLK 8-Punkt Lifterbügel** die **SL-Sicherung am Lifterbolzen**.

- Positionieren Sie den Bolzen **zwischen den Laschen** des Hebearms. (*Abb. 9*)

- Schieben Sie den **10 mm Bolzen** durch die Laschen und den Lifterbolzen. **Sichern** Sie ihn mit der **SL-Sicherung**. (*Abb. 10*)

- **Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Universallifters.**





**SLK 8-Punkt Lifterbügel 275** (Maximallast 275 kg)

für **SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette** **Artikel-ID 8063**

Der **SLK 8-Punkt Lifterbügel** für die **SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette** ist mit einem Lifterbolzen ausgestattet, an dem sich bereits der **passende Adapter** für das Deckenliftsystem befindet. **(Abb. 11)**

- Positionieren Sie den **SLK 8-Punkt Lifterbügel** auf einem Tisch, Bett oder auf dem Boden unter der **SLK Luna Deckenlifterkassette**.
- Stellen Sie den **Gurt der SLK Luna** auf die **richtige Länge** ein. **(Abb. 12)**
- **Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Deckenlifters.**
- Hängen Sie den Karabinerhaken des Gurtes der **SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette** in den bereits fertig montierten Adapter am Lifterbolzen des **SLK 8-Punkt Lifterbügels** ein. **Die SL-Sicherung muss hierfür nicht betätigt werden.**

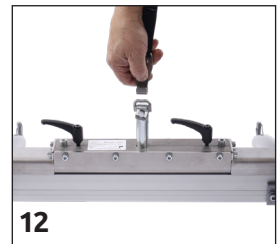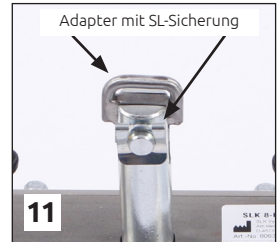


# Checkliste vor jedem Einsatz


**Vor jedem Einsatz sollte eine Sichtkontrolle durchgeführt werden.**

1. Begutachten Sie die Punkte, wo die Liftergurte eingehängt werden.  
Sind die **Haken unbeschädigt, ohne Verformungen und Risse**?  
Sind die **Federsicherungen und Stopfen vorhanden**?
2. Ist der **Lifterbügel richtig befestigt** und mit der **SL-Sicherung (Seite 10) gesichert**?
3. Ist der **Liftergurt rissfrei** und sind die **Nähte unbeschädigt**?

**Benutzen Sie den SLK 8-Punkt Lifterbügel nur wenn alle Punkte in Ordnung sind. Bei Abweichungen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.**

- **Achten Sie darauf, dass die Richtungssymbole mit der Lage des Patienten übereinstimmen. (Abb. 18)**
- Drehen Sie den **Patienten auf die Seite**, mit dem Rücken zu Ihnen. Falten Sie den **Gurt doppelt** zusammen (Symbol innen) und legen Sie ihn hinter den Patienten **(Abb. 19)**
- Falten Sie nun die obenliegende Hälfte des Gurtes **noch einmal mittig**, sodass die oberen vier Schlaufen nun auf der Patientenseite liegen. **(Abb. 20)**
- Drehen Sie den Patienten auf die andere Seite und **breiten Sie den Gurt komplett auf der Unterlage aus. (Abb. 21)**
- Drehen Sie den Patienten zurück auf den Rücken. **(Abb. 22)**
- Hängen Sie alle Schlaufen **farbgleich** in die entsprechenden Haken ein. **(Abb. 23)**
- **Kontrollieren Sie vor dem Anheben, dass keine Gurte und Schlaufen unter den Lifterfüßen durchgefädelt sind.**
- Heben Sie den Patienten **etwas an**, sodass Sie beurteilen können ob das Gewicht **gut austariert** ist. **Hängt der Bügel nicht waagrecht muss der Schlitten verschoben werden. (Seite 15)**
- Ist der Bügel **waagrecht ausgerichtet**, können Sie mit dem Transfer beginnen. **(Abb. 23)** Heben Sie den Patienten **nur so hoch wie nötig.**
- **Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise auf Seite 6 und 7.**

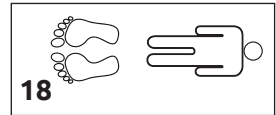

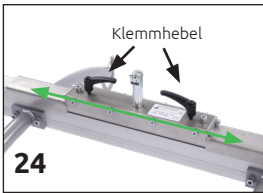

- Um den Bügel **optimal auszutarieren**, d. h. **in eine waagerechter Position** zu bringen, kann der **Schlitten auf der Profilschiene bewegt** werden. (Abb. 24)
- **Legen Sie zum Einstellen der richtigen Position den Patienten wieder ab.** Entlasten Sie die Gurte nur ein wenig.
- Lösen Sie die **beiden Klemmhebel** ca. eine halbe Umdrehung **gegen den Uhrzeigersinn**, der Schlitten lässt sich nun verschieben. (Abb. 24)
- Wenn der **Kopf zu tief** ist, bewegen Sie den **Schlitten ein Stück näher zum Kopf hin.** (Abb. 25) Drehen Sie beide Klemmhebel wieder fest und testen Sie erneut.
- Wenn der **Kopf zu hoch** ist, bewegen Sie den **Schlitten ein Stück weiter vom Kopf weg.** (Abb. 26) Drehen Sie die Klemmhebel wieder fest und testen Sie erneut.
- **Beginnen Sie den Patiententransfer erst dann, wenn der Bügel waagrecht ausgerichtet und optimal austariert ist.** (Abb. 27)

- Wenn der Transfer mit dem Universallifter durchgeführt wird, hängt der **SLK 8-Punkt Lifterbügel schräg zum Lifter**. Der Patient sollte mit dem **Kopf zum Lifter** geschoben werden. Der Transfer funktioniert nur durch **ausreichend breite Durchgänge**.
- **Beachten Sie die Gebrauchsanweisungen des eingesetzten Liftersystems.**

## Technische Daten / Maße

SLK 8-Punkt Lifterbügelmodell	Artikel-ID	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
<b>SLK 8-Punkt Lifterbügel 185</b> für SLK Carry und SLK Multy Universallifter	<b>8062</b>	160 cm	74 cm	29 cm	17 kg
<b>SLK 8-Punkt Lifterbügel 275</b> für SLK Luna – stationäre Deckenliftekassette	<b>8063</b>	160 cm	74 cm	29 cm	19 kg
<b>SLK 8-Punkt Lifterbügel 300</b> für SLK Carry 250 XL	<b>8065</b>	160 cm	74 cm	29 cm	19 kg

## Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des **SLK 8-Punkt Lifterbügel** einen feuchten Lappen mit einem milden Reinigungsmittel, wie zum Beispiel einem Haushaltsreiniger.

Benutzen Sie für die **Wischdesinfektion** die vom Robert-Koch-Institut geprüften und freigegebenen Mittel. Diese finden Sie immer aktuell auf **www.rki.de**. Navigieren Sie dort zur Desinfektionsmittelliste. Dort finden Sie auch Hinweise, welches Mittel bei welcher Verschmutzung / Kontamination wirksam ist.

Drei Beispiele für grundsätzlich geeignete Desinfektionsmittel aus der RKI-Desinfektionsmittelliste (Stand Oktober 2017):

- **hygienicVIRUZID** von Hagleitner Hygiene
- **Melsitt** von B. Braun
- **Optisept** von Dr. Schumacher



## Wartung

Die Lebensdauer und der sichere Einsatz der **SLK 8-Punkt Lifterbügel** hängen ganz wesentlich von der **regelmäßigen Durchführung der Wartung ab**. Dabei können eventuelle Mängel oder Verschleißerscheinungen erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

- Drucken Sie zum Ausfüllen den **jeweils aktuellen Wartungsplan** von der SLK-Internetseite **www.slk-gmbh.de** aus. Sie finden ihn im Downloadbereich.
- Führen Sie an Ihrem **SLK 8-Punkt Lifterbügel regelmäßig die jährliche Wartung** inklusive Funktionstest mit Maximallast durch und dokumentieren Sie diese.
- Die Wartung darf nur von **qualifiziertem Fachpersonal** ausgeführt und dokumentiert werden.
- Die Wartung muss auch **bei jeder Inbetriebnahme** (z. B. Wiedereinsatz) und **nach jeder Instandsetzung** durchgeführt und dokumentiert werden.
- Beachten Sie in diesem Zusammenhang die **Norm DIN EN 62353** „Medizinisch elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinisch elektrischen Geräten“, **die für den Betreiber gilt**.
- Nehmen Sie den Lifterbügel nicht wieder in Betrieb, wenn eine der Zeilen aus dem Wartungsplan nicht mit O.K. abgehakt werden kann. Bringen Sie ein **deutlich sichtbares Zeichen** wie z. B. ein Schild am Lifterbügel an um ihn sicher außer Betrieb zu setzen.
- Lassen Sie den Defekt durch **Fachpersonal** beheben.

# Wartungsplan


## SLK 8-Punkt Lifterbügel



Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft: mbH  
Am Herdicksbach 18  
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0  
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999  
E-Mail: info@slk-gmbh.de  
Internet: www.slk-gmbh.de

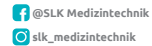

- SLK 8-Punkt Lifterbügel 185**  
für SLK Carry 185 und SLK Multy Universallifter
- SLK 8-Punkt Lifterbügel 275**  
für SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette
- SLK 8-Punkt Lifterbügel 300**  
für SLK Carry 250 XL

Seriennummer : \_\_\_\_\_ Herstelldatum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Für die Dokumentation den aktuellen Wartungsplan von der SLK-Internetseite [www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de) (Downloadbereich) verwenden.

POS.	Gegenstand	OK	nicht OK	Bemerkungen	Instandgesetzt am:
1	Kompatibilitätserklärung der Zubehör- und Gerätekombinationen vorhanden				
2	Gebrauchsanweisung vorhanden				
3	Typenschilder vorhanden und lesbar				
4	Lifterbügel im Originalzustand				
5	keine Oberflächenbeschädigung oder Korrosion				
6	Schweißnähte in Ordnung, keine Risse, Rildulde / Deformierungen				
7	Schrauben mit Nennmoment fest angezogen (M → 40 Nm, M12 → 18 Nm)				
8	Festsicherungen und Sicherungswarnungen				
9	Bolzen des S-Sicherungs in einwandfreiem Zustand (bei Einwirkung austauschen)				
10	Radialkugellager bei Korrosion oder mechanischer Beschädigung austauschen.				
11	Prüfung mit maximaler Nennlast nach EN 10535 Anhang B1				

Aktuellen Wartungsplan von der SLK-Internetseite verwenden!

- Der 8-Punkt Lifterbügel kann verwendet werden.
- Der 8-Punkt Lifterbügel darf ab sofort nicht mehr verwendet werden und muss vor Weiterverwendung instand gesetzt werden.

## Konformität

Die **SLK 8-Punkt Lifterbügel** sind Medizinprodukte der Klasse 1 nach der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745.

Die Konformitätserklärung wurde nach Abschnitt 2, Artikel 52, Absatz 7 erstellt und kann im Volltext von unseren Kunden jederzeit angefordert werden.

## Angewendete Normen

Alle Modelle des **SLK 8-Punkt Lifterbügel** entsprechen den zutreffenden Abschnitten der EN ISO 10535:2021.

## Gewährleistung / Garantie

Die Gewährleistung und Garantie richtet sich nach unseren aktuellen Servicerichtlinien. Diese können von unseren Kunden jederzeit angefordert werden.

## Lebensdauer

Die maximale Lebensdauer des 8 Punkt Liftergurtes beträgt 8 Jahre.

## Entsorgung



Der **SLK 8-Punkt Lifterbügel** sollte nach Materialien getrennt entsorgt werden.

## Artikel-IDs der Ersatzteile

Artikel-ID	SLK 8-Punkt Lifterbügelmodell	Gebrauchsanweisung	Serviceset*
8062	<b>SLK 8-Punkt Lifterbügel 185</b> für SLK Carry und SLK Multy Universallifter	8303 (deutsch)	8706
8063	<b>SLK 8-Punkt Lifterbügel 275</b> für SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette	8303 (deutsch)	8707
8065	<b>SLK 8-Punkt Lifterbügel 300</b> für SLK Carry 250 XL	8303 (deutsch)	8706

\* Das Serviceset beinhaltet alle Schrauben, Muttern, Kappen und sonstige Kleinteile.

we lift you up



## Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH  
Am Herdicksbach 18  
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0  
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999  
E-Mail: [info@slk-gmbh.de](mailto:info@slk-gmbh.de)  
Internet: [www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de)

Revision: 013 - 02/2025

**Bitte kontaktieren Sie als  
Endverbraucher Ihren Zulieferer.**

 @SLK Medizintechnik

 slk\_medizintechnik

#workgreen

### Gebrauchsanweisung Artikel-ID 8303

Besuchen Sie unsere Internetseite [www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de).

Im Downloadbereich finden Sie die aktuelle Version dieser Gebrauchsanweisung.