

# Wartungsplan

## SLK 8-Punkt Lifterbügel



Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH  
Am Herdicksbach 18  
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0  
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999  
E-Mail: info@slk-gmbh.de  
Internet: www.slk-gmbh.de

@SLK Medizintechnik

slk\_medizintechnik

- SLK 8-Punkt Lifterbügel 185**  
für SLK Carry 185 und SLK Multy Universallifter
- SLK 8-Punkt Lifterbügel 275**  
für SLK Luna – stationäre Deckenlifterkassette
- SLK 8-Punkt Lifterbügel 300**  
für SLK Carry 250 XL

Seriennummer : \_\_\_\_\_ Herstellungsdatum: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Für die Dokumentation den aktuellen Wartungsplan von der SLK-Internetseite [www.slk-gmbh.de](http://www.slk-gmbh.de) (Downloadbereich) verwenden.

POS.	Gegenstand	OK	nicht OK	Bemerkungen	Instandgesetzt am:
1	Kompatibilitätserklärung der Zubehör- und Gerätekombinationen vorhanden				
2	Gebrauchsanweisung vorhanden				
3	Typenschilder vorhanden und lesbar				
4	Lifterbügel im Originalzustand				
5	keine Oberflächenbeschädigung oder Korrosion				
6	Schweißnähte in Ordnung, keine Rissbildungen / Deformierungen				
7	Schrauben mit Nenndrehmoment angezogen (M6 → 9 Nm, M8 → 15 - 18 Nm)				
8	Federsicherungen und Stopfen vorhanden				
9	Bolzen mit SL-Sicherung in einwandfreiem Zustand (bei Einarbeitung austauschen)				
10	Axialkugellager bei Korrosion oder mechanischer Beschädigung austauschen.				
11	Prüfung mit maximaler Nennlast nach EN 10535 Anhang B1				

**Der 8-Punkt Lifterbügel kann verwendet werden.**

**Der 8-Punkt Lifterbügel darf ab sofort nicht mehr verwendet werden und muss vor Weiterverwendung instand gesetzt werden.**

**Eine entsprechende Kennzeichnung wurde angebracht. Die verantwortliche Person wurde in Kenntnis gesetzt und bestätigt dies hiermit durch ihre Unterschrift:** \_\_\_\_\_

Position der verantwortlichen Person: \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Prüfer: \_\_\_\_\_

Nächste Wartung: \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben: \_\_\_\_\_

**Alle Mängel wurden fachgerecht beseitigt. Der Lifterbügel kann verwendet werden.**

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Prüfer: \_\_\_\_\_

Nächste Wartung: \_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben: \_\_\_\_\_